

v-code
3962

optive[®]

**Zweifach wirksame, benetzende
und osmoprotektive Augen-Pflegetropfen**

3962

71885EW14

N

 **ALLERGAN**

v-code
3962

Die spezifische, zweifach wirksame Zusammensetzung von OPTIVE[®] verschafft lang anhaltendes Augenwohlgefühl. OPTIVE[®] benetzt die Augenoberfläche und spendet den Zellen der Augenoberfläche Feuchtigkeit durch Wiederherstellung des natürlichen osmotischen Gleichgewichts.

Beschreibung:

OPTIVE[®] ist eine sterile Lösung in einem Mehrdosenbehältnis, die Natriumcarboxymethylcellulose, Glycerol, Levocarnitin und Erythritol enthält. Sie ist mit PURITE[®] konserviert, das am Auge in natürliche Bestandteile der Tränenflüssigkeit zerfällt.

OPTIVE[®] ist zur Anwendung mit allen Arten von Kontaktlinsen geeignet.

Hinweise für die Anwendung

Nach Bedarf 1 oder 2 Tropfen in das/die Auge(n) geben.

Vorsichtshinweise


- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie auf einen der Inhaltsstoffe allergisch sind.
- Lösung nicht einnehmen.
- Um Verunreinigungen zu vermeiden, sollten Sie die Tropferspitze nicht berühren und direkten Kontakt mit dem Auge vermeiden.
- Flasche sofort nach Gebrauch fest verschließen.
- Lösungsreste 6 Monate nach dem Öffnen verwerfen.
- Nicht nach Ablauf des auf dem Produkt angegebenen Verfalldatums verwenden.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Bei Raumtemperatur aufbewahren.
- Verwenden Sie die Flasche nicht, wenn die Versiegelung des Verschlusses vor dem ersten Öffnen beschädigt ist.
- Bei Verwendung zusammen mit anderen Augentropfen sollten zwischen den Anwendungen mindestens 5 Minuten liegen.

Warnhinweis

Wenn Ihre Augenprobleme weiter bestehen, sprechen Sie bitte mit Ihrem Augenarzt.

Wie ist das Produkt erhältlich?

OPTIVE[®] Augen-Pflegetropfen sind in Kunststoffflaschen mit 3 (unverkäufliches Muster) und 10 ml Inhalt erhältlich.

 Hersteller:
Allergan Pharmaceuticals Ireland
Castlebar Road, Westport, Co. Mayo, Irland

STERILE A

CE 0459

 **ALLERGAN**